

MAVEX

SWISS PEDICURE SYSTEM

CALLUSPEELING®



Après avoir mis des gants, appliquez 4 patches CALLUSPEELING-ULTRA sur la zone des pieds où il y a de l'hyperkératose. Utiliser tout la liquide dans l'emballage.




Occlure avec le film pellicule, et laissez agir pendant 15 minutes.



Enlever un seul patch (laisser les autres en places) et enlever (racler) l'hyperkératose avec la spatule



Appliquer l'adhésif lissant sur la brosse. Polir rapidement en faisant une bonne pression et sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de peluche de callosité, à chaque passage: ça ne brûle pas, ne chauffe pas et ne dérange pas. Après cette étape, répétez l'étape 3.

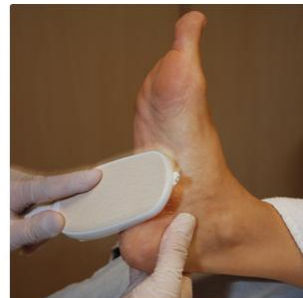

A la fin du traitement rincez et séchez soigneusement les pieds. Pour un effet durable, il est très important d'appliquer une petite quantité de Daily crème. Masser doucement tout le pied, jusqu'à absorption complète.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

CALLUSPEELING-ULTRA est un Dispositif Médical, avant toute utilisation, lire attentivement les avertissements et les instructions sur l'emballage. Eviter tout contact avec les yeux. Ne pas appliquer sur la peau abîmée ou irritée. Cessez immédiatement toute application dès l'apparition d'irritations cutanées: si persistent consulter un médecin. En cas de diabète demander l'avis d'un spécialiste car la condition du pied peut nécessiter d'un traitement spécifique. Ne pas appliquer sur le visage et les muqueuses. Ne pas appliquer sur la peau avec d'autres médicaments ou produits médicaux. Utiliser toujours des gants pour manipuler les patches. Éviter le contact avec la peau où il n'y a pas des callosité. Produit jetable, une fois ouvert ne pas réutiliser. Utilisez le produit une seule fois par semaine par client. Désinfecter les outils après chaque traitement.